

# Mascherina chirurgica

Mascherina filtrante monouso a 3 strati di Tipo II, prodotta in deroga alle normative vigenti in base all'art. 15 comma 2 del D.L. 18 del 17/3/2020. Non può essere utilizzata a emergenza epidemiologica conclusa senza previa autorizzazione del produttore. Autorizzata dall'Istituto Superiore di Sanità. Aut. COV1121. **Confezione da 10 pezzi Unisex**

## COMPOSIZIONE:

Primo strato: 25 g/m<sup>2</sup> TNT in polipropilene spun bonded

Secondo strato: 25 g/m<sup>2</sup> melt blown in polipropilene caricato elettrostaticamente

Terzo strato: 25 g/m<sup>2</sup> TNT in polipropilene spun bonded

Potere filtrante BFE >98% (**valore effettivo certificato in Italia: 99%**)

Pressione differenziale <40Pa/cm<sup>2</sup> (**valore effettivo certificato in Italia: <22,5 Pa/cm<sup>2</sup>**)

## ISTRUZIONI D'USO:



1. Disinfettare accuratamente le mani con un gel a base di alcol o in alternativa lavare accuratamente le mani con sapone per almeno 60 secondi. Aprire la zip, estrarre una mascherina e richiudere lungo la zip per proteggere le restanti mascherine. Non utilizzare la mascherina se è stata precedentemente utilizzata.
2. Tenendo l'arco nasale in alto e la parte colorata verso l'esterno, indossare la mascherina sulla faccia e agganciare i due elastici attorno alle orecchie.
3. Aprire completamente le pieghe della mascherina affinché la faccia sia coperta dal naso al mento compresi.
4. Premere delicatamente l'arco nasale con gli indici di entrambe le mani lungo il profilo fino a fare aderire la mascherina. Non tenere mai la mascherina appesa al collo.
5. Una volta indossata non toccare la mascherina con le dita.
6. In circostanze anomale che possano ridurre il livello di protezione della mascherina, rimuoverla immediatamente e, se necessario, sottoporsi ai controlli sanitari appropriati.
7. Sostituire la mascherina se danneggiata, contaminata o umida.
8. Disinfettare completamente le mani dopo la rimozione della mascherina.
9. Non disperdere la mascherina nell'ambiente. Non reintrodurre nella confezione una volta utilizzata. Smaltire la mascherina in un contenitore per rifiuti appropriato. Se utilizzata fuori dall'ambiente ospedaliero buttare in un sacchetto dell'indifferenziata, chiudere il sacchetto e inserire dentro un nuovo sacchetto insieme al resto dell'indifferenziata. In ambito ospedaliero smaltire come rifiuto medico-ospedaliero.
10. Utilizzo massimo consentito: 4 ore consecutive.

## AVVERTENZE:

Non sterile, non riutilizzabile. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati e con sufficiente livello di ossigeno. Non usare in ambienti dove i contaminanti e le loro concentrazioni sono ignote. Non protegge da gas o vapori. Non alterare, modificare o pulire la mascherina. Rimuovere se la resistenza respiratoria diventa eccessiva. Non usare la mascherina oltre la data di scadenza. Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra -10° e 40°C; umidità massima: 80%. Non sono segnalate interferenze o rischi per uso congiunto con altri dispositivi.

**DATA DI PRODUZIONE:** vedere sulla confezione **DATA DI SCADENZA:** vedere sulla confezione

**CODICE:** SMIDPI01F **LOTTO DI PRODUZIONE:** vedere sulla confezione **MADE IN CHINA**

Importata e distribuita da Polonord Adeste Srl

Via C. Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore (BO), Italia

Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

